



clinell®

www.clinell.be/fr

SPECTRE D'ACTION
LARGE, TEMPS DE
CONTACTS COURTS

UNIVERSAL WIPES

POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION
DES SURFACES, DES MAINS ET DES APPAREILS

Polyvalentes

Les lingettes Clinell peuvent être utilisées pour désinfecter et nettoyer. Vous n'avez donc plus besoin de vous encombrer de différents types de lingettes et de nettoyeurs de surface.

Efficacité prouvée

Les lingettes Clinell éliminent 99,99 % des bactéries et virus à partir de 10 secondes.

Testées dermatologiquement

Les lingettes Clinell contiennent de l'aloë vera et des agents hydratants. Celles-ci sont douces pour la peau.

Efficacité prouvée contre :

SARM, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Norovirus, Coronavirus et bien d'autres encore.

Les lingettes Clinell antimicrobiennes pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des mains et des appareils



Éliminent 99,99 % des bactéries et virus, dont le coronavirus.

- ✓ Solution polyvalente pour le nettoyage et la désinfection
- ✓ Efficaces dès 10 secondes
- ✓ Éliminent 99,99 % des bactéries et virus
- ✓ Peuvent être utilisées sur les mains visiblement sales, contrairement aux gels à base d'alcool
- ✓ Idéales pour les situations où vous ne disposez pas d'eau ni de savon
- ✓ Lingettes épaisses et solides en non-tissé (spunlace), adaptées à un usage fréquent

MODE D'EMPLOI POUR LES MAINS

Frictionnez-vous les mains pendant 60 secondes.

- Frottez les paumes l'une contre l'autre.
- Nettoyer le dos de chaque main avec la paume de l'autre main, passez entre les doigts.
- Frottez les paumes de vos mains l'une contre l'autre et passez entre les doigts.
- Frottez l'arrière des doigts dans la paume de l'autre main avec les doigts joints.
- Saisissez chaque pouce avec l'autre main et frottez en effectuant des mouvements circulaires.
- Frottez le bout des doigts dans la paume de l'autre main et effectuez des mouvements circulaires.
- Nettoyez chaque poignet avec l'autre main.
- Jetez la lingette dans la poubelle appropriée.

MODE D'EMPLOI POUR LES SURFACES

- Retirez une lingette de l'emballage.
- Effectuez un balayage en S, du côté propre vers le côté sale.
- Jetez la lingette dans la poubelle appropriée.
- Laissez sécher à l'air libre.

BACTÉRIES	TEST	TEMPS
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	EN13727	10 sec.
<i>Klebsiella pneumoniae</i> (ESBL)	EN13727	10 sec.
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN13727	10 sec.
<i>Enterobacteriaceae</i> (CRE)	EN13727	10 sec.
<i>Escherichia coli</i>	EN13727	10 sec.
<i>Listeria monocytogenes</i>	EN13727	10 sec.
<i>Campylobacter jejuni</i>	EN13727	10 sec.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN13727	10 sec.
<i>Acinetobacter baumannii</i>	EN13727	10 sec.
<i>Salmonella typhimurium</i>	EN13727	10 sec.
MYCOBACTÉRIES		
<i>Mycobacterium smegmatis</i>	EN14348	10 sec.
<i>Mycobacterium terrae</i>	EN14348	10 sec.
LEVURES ET MOISSISURES		
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN16615	2 min
<i>Candida albicans</i>	EN13624	10 sec.
<i>Candida auris</i>	EN13624	10 sec.
VIRUS		
Adenovirus	EN14476	30 sec.
Influenza (H1N1)	EN14476	30 sec.
Norovirus	EN14476	30 sec.
Hépatite B	ASTM 1052	60 sec.
Hépatite C	EN14476	60 sec.
MERS-CoV (coronavirus humain)	EN14476	60 sec.
DÉSINFECTION DES MAINS		
Désinfection hygiénique des mains	EN 1500	60 sec.

SUR QUOI L'UTILISER :

Cette liste n'est pas exhaustive.



PRODUIT	CONDITIONNEMENT À L'UNITÉ	NON-TISSÉ	DIMENSIONS	TYPE DE COUVERCLE	BIOCIDE TYPE DE PRODUIT	CODE PRODUIT
Lingettes Universal 100	100 pièces	Spunlace 60g/m ²	26 x 18 cm	Couvercle en plastique	PT1 et PT2	BCW100BE

Utilisez les biocides avec précaution. Consultez toujours les informations figurant sur l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.